

智抗糖APP操作步驟

掃描 QR Code



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

免費下載「智抗糖」



使用手機號碼註冊最簡易！



以 Google 繼續



以 Facebook 繼續



以手機號碼繼續




以電子信箱繼續

加入台灣人壽與糖同行Family

1

個人化「智抗糖」

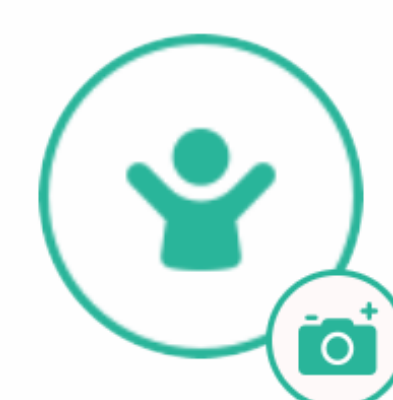

為了提供更您更好的服務，請讓我們多了解您！

開始！

點選「開始」

2



您是否有邀請碼？

(若您是被夥伴邀請加入智抗糖，請輸入您收到的邀請碼)

是

否

點選「是」
我有邀請碼


3

輸入邀請碼

邀請碼

BSGM

完成

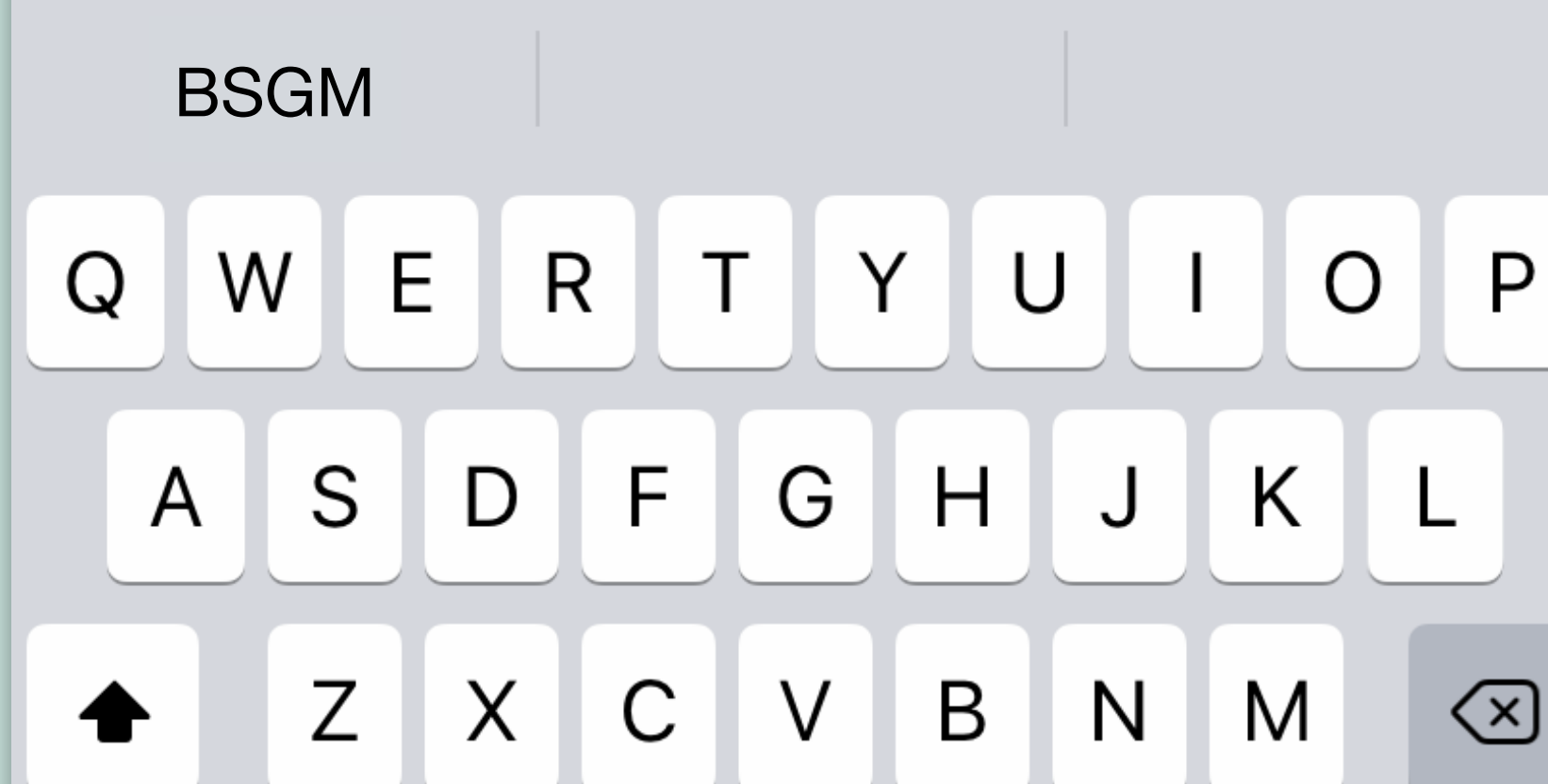

輸入與糖同行邀請碼
「BSGM」

4

輸入邀請碼

台灣人壽與糖同行Family

請輸入身分證字號，此資料僅供診所/醫院辨識身份使用。

請輸入

完成

輸入身分證字號

5

個人化



謝謝！您已成功加入台灣人壽與糖同行Family

下一步

成功加入夥伴！


6

夥伴



點選「夥伴」進入頁面

輸入數據

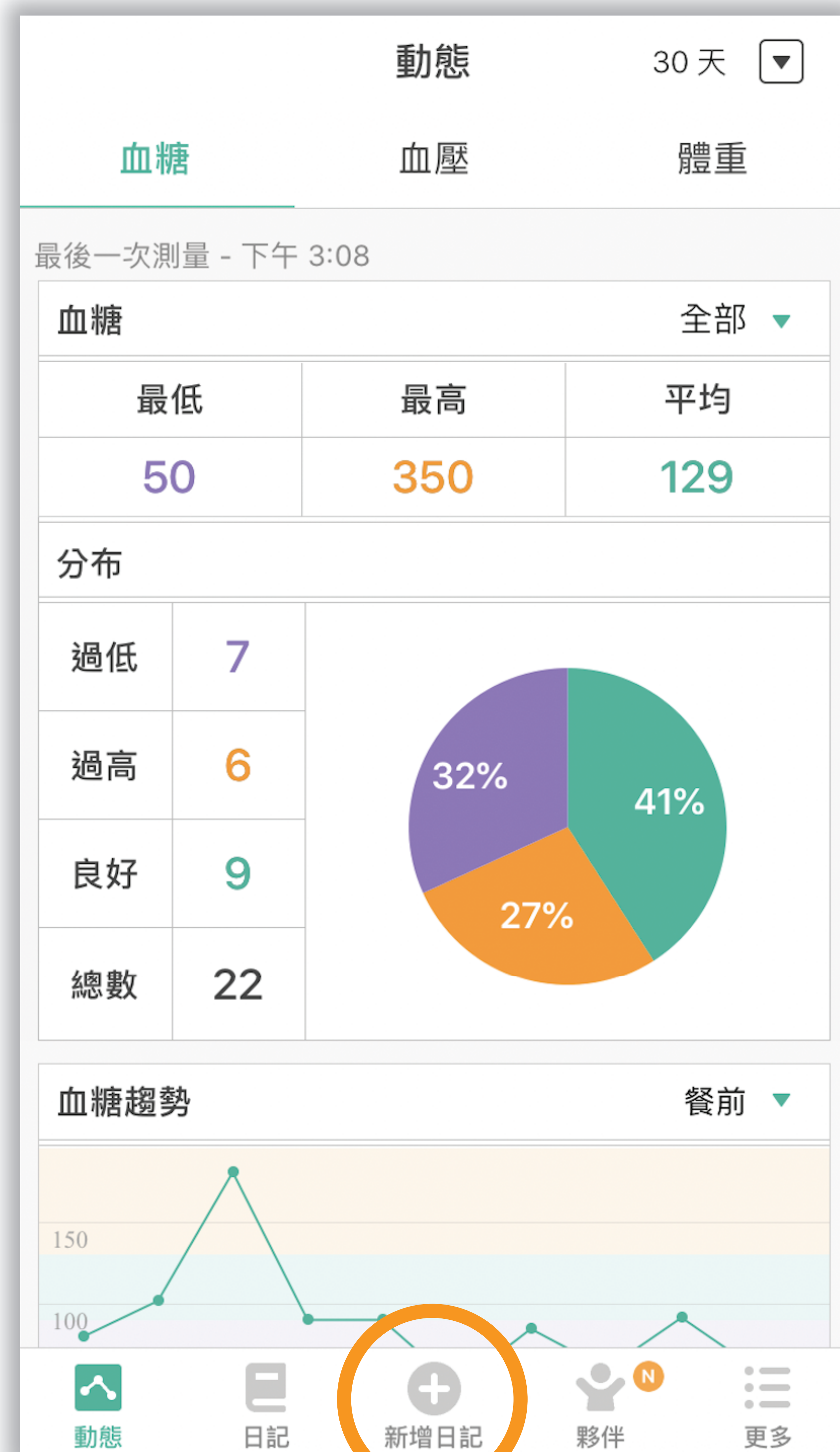

手動輸入



藍牙上傳

時間 2021/01/21 週四 上午 9:18

時段 早餐前

血糖 92 mg/dL

飲食

+ 用類別

+ 搜尋食物資料庫 / 最愛

增加其他紀錄：

藥物

取消 完成

記錄血糖

記錄飲食

*下拉選單增加其他紀錄
並點選「完成」儲存日記卡

動態 30天

血糖 血壓 體重

最後一次測量 - 下午 3:08

血糖		
最低	最高	平均
50	350	129

分布

狀態	次數
過低	7
過高	6

選擇欲同步的機器

血糖機

血壓計

體重計

取消

以下藍牙機種
皆可連結上傳

羅氏 五鼎
優安進 福爾
穩豪

*所有可串連血糖機型，
請見 App 右下角「更多」

